

Toallitas desinfectantes

CLEANISEPT® WIPES

Toallitas libres de alcohol para desinfección rápida

- Aplicación universal, fácil y rápida, utilizando el práctico dispensador.
- Rápida eficacia desinfectante.
- Para desinfección de sondas de ultrasonido, ideal para exámenes abdominales.



048

Descripción del producto

CLEANISEPT WIPES son toallitas desinfectantes libres de alcohol, listas para usarse, para desinfección y limpieza de dispositivos y equipo médico. CLEANISEPT WIPES permite una aplicación rápida y sencilla, particularmente, para desinfectar y limpiar sondas de ultrasonido que no entran en contacto con membranas de mucosa. No contienen alcohol, ni aldehídos y fenoles. Las toallitas se pueden remover de manera individual utilizando el práctico dispensador resellable.

Rango de aplicación

De acuerdo a la regulación biocida (BPR): Para la desinfección rápida y limpieza de equipo médico sensible al alcohol y superficies de todo tipo.

De acuerdo a la directriz de dispositivos (MDD): Para desinfección rápida y limpieza dispositivos médicos sensibles al alcohol y no invasivos.

Aplicación

Frote las superficies con CLEANISEPT WIPES hasta que esté completamente mojada y permita que seque por el tiempo completo sugerido de contacto

Caducidad después de abierto: 3 meses.

Espectro de eficacia y tiempos de contacto			30 s	1 min	2 min
Bacteria y hongos					
Aplicación recomendada para desinfección de superficies: Bactericida, fungicida*	VAH**/ EN 16615	con acción mecánica, condiciones sucias		•	
Virus envueltos					
Contra virus envueltos	RKI/DVV	incl. VHB/VIH/VHC	•		
	EN 14476	condiciones limpias	•		
Virus no envueltos					
Active contra virus papova/SV40	EN 14476	condiciones sucias			•
Active contra rotavirus	RKI/DVV		•		
Resultados adicionales de pruebas					
bactericida	EN 1040			•	
	EN 13727	condiciones sucias		•	
fungicida (C. albicans)	EN 1275			•	
	EN 13624	Condiciones sucias		•	

** incluyendo pruebas fase 2, paso 1 y fase 2, paso 2 (pruebas cuantitativas de suspensión y pruebas cuantitativas de portadores)
** de acuerdo a EN 14476, prueba virus MVA (vacciniavirus)

Composición

100 gr. de solución contienen:
0.5 gr. Componentes cuaternario de amonio cloruros, bencil-C12-16-alkildimetil.
0.25 gr. cloruro de didecil-dimetil- amonio



CLEANISEPT® WIPES

Toallitas libres de alcohol para desinfección rápida.

Aprobación de fabricantes

CLEANISEPT WIPES se recomiendan para desinfectar dispositivos de ultrasonido y sondas de ultrasonido de los siguientes fabricantes:

- Aloka GmbH, Meerbusch, Alemania
- Esaote GmbH, Colonia, Alemania
- FUJIFILM SonoSite GmbH, Frankfurt, Alemania
- General Electric Deutschland Holding GmbH, Frankfurt am Main
- Hitachi Medical Systems GmbH, Wiesbaden, Alemania
- Philips Medizin Systeme GmbH, Hamburgo, Alemania.
- Shimadzu Deutschland GmbH, Duisburg, Alemania
- Siemens Medical Solutions, Erlangen, Alemania
- SonoAce GmbH, Marl, Alemania
- Toshiba Medical Systems GmbH, Neuss, Alemania
- Zonare Medical Systems GmbH, Erlangen, Alemania

CLEANISEPT WIPES se recomienda para desinfectar dispositivos médicos de los siguientes fabricantes:

- Cardinal Health, Alemania
- Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Alemania
- Konrad Hornschuch AG, Weißbach, Alemania
- Schmitz & Söhne, Wickede, Alemania
- Tomey/Eye Novation GmbH, Bielefeld, Alemania

Opiniones de expertos

Se tienen reportes extensos de expertos para todos los productos. Si lo solicita, con gusto se le envía el portafolio de reportes de expertos.

Declaraciones de precaución y peligro

Dañino a la vida acuática con efectos de largo plazo. Evite dispersarlo en el medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de quitar. Continúe enjuagando. Deseche contenido y empaque de manera adecuada. Recicle.

Para uso profesional únicamente.

Producto	Unidad	Cont.	Unidad entrega	Tamaño	REF
CLEANISEPT WIPES	dispensador	100 wipes	12	14x20 cm	00-208-D100-01
	bolsa repuesto	100 wipes	12	14x20 cm	00-208-R100-01
	mini bolsa	20 wipes	50	14x20 cm	00-208-T020

CE 0482



Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com