

Toallitas desinfectantes

# CLEANISEPT® WIPES FORTE

Toallitas libres de alcohol para desinfección rápida

- Aplicación universal fácil y rápida, utilizando el práctico dispensador.
- Rápida y extensiva eficacia desinfectante
- Para desinfección virucida de sondas de ultrasonido, ideal para exámenes abdominales y trans-vaginales.



Descripción del producto

CLEANISEPT WIPES FORTE son toallitas, listas para utilizarse, libres de alcohol para la desinfección y limpieza de dispositivos médicos e inventario médico.

CLEANISEPT WIPES FORTE permite una aplicación rápida y sencilla, especialmente, para la desinfección y limpieza de sondas de ultrasonido para exámenes trans-vaginales. Las toallitas están libres de alcohol, aldehídos y fenoles.

Las toallitas se pueden remover de manera individual utilizando el práctico dispensador resellable. CLEANISEPT WIPES FORTE está basado en una solución amigable con el usuario. El producto es inodoro y tiene una muy buena compatibilidad con los materiales, pero aun así, ofrece una muy alta y extensiva eficacia en solo 2 minutos.

Rango de aplicaciones

De acuerdo a la directriz de dispositivos (MDD): Para desinfección rápida y limpieza dispositivos médicos sensibles al alcohol y no invasivos al igual que para sondas de ultrasonido para exámenes trans-vaginales y abdominales.

Aplicación

Frote las superficies con CLEANISEPT WIPES FORTE hasta que esté completamente mojada y permita que seque por el tiempo completo sugerido de contacto.

Espectro de eficacia y tiempos			2min.
<b>Bacteria y hongos</b>			
Aplicación recomendada para desinfección de superficies: Bactericida, fungicida*	VAH**/ EN 16615	con acción mecánica, condiciones sucias	●
esporicida (Clostridium difficile)	EN 13704		●
<b>Virus</b>			
virucida	RKI/DVV	incl. polio-, adeno-, norovirus y SV40 / virus papova- / polioma	●
virucida**	EN 14476/prEN 16777	condiciones limpias	●●
activo contra virus polioma	4-field-test / practical carrier test		●

\*including phase 2 step 1 and phase 2 step 2 tests (quantitative suspension tests and quantitative carrier tests)  
\*\*listed in the 5 min column of the VAH list

Descripción para aplicación

Cuando se reprocesan sondas de ultrasonido se deben tener en cuenta las normas higiénicas básicas (especialmente el uso de equipos de protección personal, un entorno de trabajo higiénico adecuado, desinfección higiénica de manos).

Limpieza previa: después de retirar la cubierta protectora de la sonda, limpie con una toalla desechable comercial, libre de gérmenes y pelusas, que haya sido humedecida con agua. Cierre la mano con la toalla desplegada alrededor de la sonda y limpie las superficies de manera uniforme 5 veces mientras aplica una ligera presión.

Asegúrese que la superficie esté completamente mojada. Posteriormente seque la sonda con una toalla desechable adicional. Deseche la toalla.

Limpieza: Retire una toallita CLEANISEPT WIPES FORTE del envase y desdoble con la mano abierta. Limpie todas las superficies, incluida la manija, cerrando la mano alrededor de la sonda y limpiando la superficie de manera uniforme 5 veces mientras aplica una ligera presión. Asegúrate de que la superficie esté completamente mojada. Deseche toallita.



# CLEANISEPT® WIPES FORTE

Toallitas libres de alcohol para desinfección rápida

**Desinfección:** Retire una segunda toallita **CLEANISEPT WIPES FORTE** del paquete y desdóblela con la mano abierta. Desinfecte todas las superficies, incluyendo la manija, cerrando la mano alrededor de la sonda y limpiando la superficie de manera uniforme 5 veces mientras aplica una ligera presión. Asegúrese de que la superficie esté completamente húmeda. Deje las sondas expuestas a la solución de desinfección de la toallita durante al menos 2 minutos. Descartar toallita.

### Notas para la aplicación

Vida útil en el anaquel una vez abierto el paquete: 28 días.

### Composición

100 g de solución contienen:  
 0.4 g de cloruro de alquil (C12-16) dimetil amonio  
 0.2 g de cloruro de didecil dimetil amonio

### Compatibilidad de materiales

**CLEANISEPT WIPES FORTE** se recomienda para la desinfección de sondas de ultrasonido para exámenes abdominales y trans-vaginales de los siguientes fabricantes:

- Esaote GmbH, Köln
- SiemensMedical Solutions, Erlangen

### Opiniones de expertos


Se tienen reportes extensos de expertos para todos los productos. Si lo solicita, con gusto se le envía el portafolio de reportes de expertos.

### Declaración de precaución y peligro


Dañino a la vida acuática con efectos de largo plazo. Evite dispersarlo en el medio ambiente. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de quitar. Continúe enjuagando. Deseche contenido y empaque de manera adecuada. Recicle.

Para uso profesional únicamente.


### PRE-LIMPIEZA

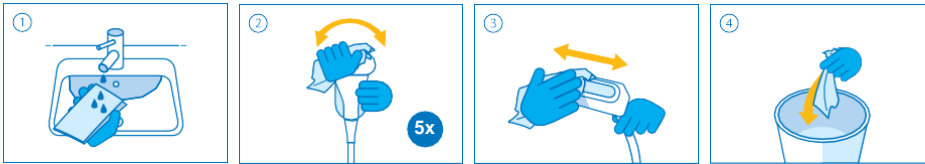


### LIMPIEZA

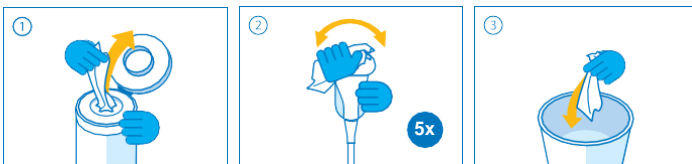

### DISINFECCIÓN

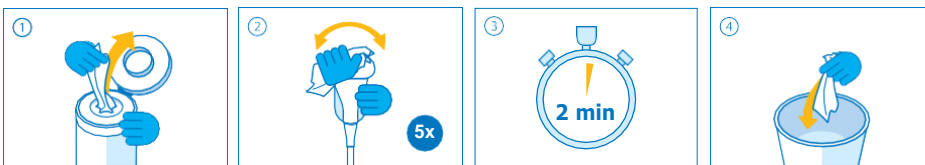

### SECADO

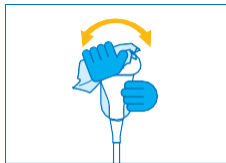

### GUARDADO



Producto	Unidad	Contenido	Unidades caja	Tamaño	REF
CLEANISEPT WIPES FORTE	Dispensador	100 toallitas	12	14 x 20 cm	00-235-D100

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)