

PERFEKTAN® ENDO

Desinfectante para instrumentos y endoscopios

- Preparación libre de aldehídos con buenas propiedades de limpieza
- Alta compatibilidad de materiales – adecuado para el procesamiento de endoscopios
- Eficacia virucida exhaustiva

aprobado por
STORZ, OLYMPUS-WINTER & IBE, WOLF

- ✓ eficacia virucida exhaustiva
- ✓ libre de aldehídos
- ✓ libre de fenoles



CE 0482

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PERFEKTAN® ENDO es un desinfectante de instrumentos poderoso libre de aldehídos para la desinfección y limpieza de instrumentos por inmersión. El principio sinérgico de su fórmula totalmente innovadora, combina una alta compatibilidad en materiales y propiedades excelentes de limpieza, que establece nuevos estándares en la desinfección de instrumentos. Perfektan Endo cumple con todos los requerimientos que los profesionales han solicitado por muchos años.

PERFEKTAN® ENDO contiene eficientes inhibidores de corrosión y esta libre de aldehídos y fenoles. Debido a sus excelentes propiedades de limpieza, una combinación de desinfección y limpieza de acuerdo a las directrices para desinfección de instrumentos y endoscopios de RKI (Robert Koch Institute), la desinfección es posible en un solo paso. La fijación de proteínas se evita gracias a la formulación libre de aldehídos.

La desinfección del instrumental médico se puede hacer inmediatamente después de utilizarlo sin necesidad de prelavado o utilizar equipo o protección especial.

Perfektan Endo cumple con los requerimientos de la legislación Alemana para la seguridad en lugares de trabajo concerniente a agentes irritantes en instalaciones médicas TRGS 525/406.

RANGO DE APLICACIONES

PERFEKTAN® ENDO es ideal para la desinfección y limpieza de todo tipo de instrumentos quirúrgicos, incluyendo instrumentos utilizados en cirugía micro-invasiva, **materiales de anestesia y endoscopios rígidos y flexibles**. Adecuado para usarse en baños ultrasónicos y procedimientos de circulación al igual que en herramientas semiautomáticas de endoscopia.

PERFEKTAN® ENDO puede utilizarse para desinfección rápida y limpieza en un procedimiento de un solo paso.

APLICACIONES

Sumerja los instrumentos abiertos en la solución de trabajo inmediatamente después de utilizarlos. Asegúrese de mojar completamente con la solución de trabajo todas las superficies de los instrumentos y sus cavidades.

Habiendo concluido el tiempo de exposición, enjuague instrumentos completamente con agua limpia y deje secar. Un enjuague con agua desmineralizada es altamente recomendable, seguida del secado subsecuente.

La solución de trabajo debe de remplazarse dependiendo del nivel de suciedad. La opinión de un experto para el tiempo de reposo de la solución está disponible.

PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS

PERFEKTAN® ENDO es:

- Bactericida inclusive (Estafilococo aureus multi-resistente MRSA)
- Tuberculocida
- Fungicida (C.albicans)/ levurocida
- Virucida incluyendo virus VHB / VIH / VHC / DVBV / Vaccinia / Polioma / Adeno virus, Polio virus (a 50°C)
- Esporicida

COMPOSICIÓN

100 g de solución contienen:

- 3.75g Diacetato de cocospilendiamina – guanadina.
- 5.63g Didecilmetil-oxietil propionato de amonio

Los tensioactivos contenidos en el producto son biodegradables de acuerdo con la regulación de detergentes de la EU.





PERFEKTAN® ENDO

Desinfectante para instrumentos y endoscopios

CONCENTRACIONES Y TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

Bactericida incl. MRSA y fungicida (C.albicans)/ levurocida	1,0 %	60 min
	2,0 %	30 min
	3,0 %	15 min
Bacteria TB (M. terrae)	1,0 %	60 min
	2,0 %	30 min
	3,0 %	15 min
Desinfección en combinación con ultrasonidos	1,0 %	5 min
	3,0 %	2 hrs*
Esporicida	1,0 %	30 min
	3,0 %	15 min
Efectivo contra todos los virus envueltos VHB / VIH / VHC / DVBV / Vaccinia virus	1,0 %	30 min
	3,0 %	15 min
	2,0 %	60 min
Adenovirus	2,0 %	60 min
	4,0 %	30 min
	1,0 %	60 min
Papova /polioma -virus	2,0 %	30 min
	1,0 %	10 min

*(prueba cuantitativa de suspensión)

PROPIEDADES QUÍMICAS/FÍSICAS

Apariencia del concentrado:	Líquido cian, claro
Valor pH:	aprox. 9,0 +/- 0,5
Peso específico:	aprox. 1.005 g/ml

PRESENTACIONES

Empaque unitario	Empaque múltiple	No. Art.
Botellas Dosificadora 1L	10 x 1 L	00-121-010

INFORMACIÓN ESPECIAL

Previo al uso de Perfektan Endo, todos los instrumentos y contenedores de inmersión deben de ser limpiados con agua limpia y Desco Cleaner para remover por completo residuos químicos (aldehídos). Para limpiar instrumentos con un bajo lumen como endoscopios, se recomienda el uso de Instru Plus. **PERFEKTAN® ENDO** no es propicio para la desinfección de mascarar de laringe.

El producto puede ocasionar quemaduras. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua abundante y busque el consejo de un medico.

Los desechos de este material y su contenedor deben de ser manejados de una manera segura. Utilice vestimenta protectora adecuada, guantes y protección de ojos/cara. En caso de accidente o si tiene malestares consulte a un medico. Utilice en áreas bien ventiladas. Mantenga fuera del alcance de niños.

OPINIÓN DE EXPERTOS

Prof. Dr. Schubert, higienologo. Frankfurt/M, Alemania.

Reporte experto en desinfección de instrumentos de acuerdo a las directrices de VAH/DGHM, 2005-12-23

Prof. Dr. Werner, higienologo. Schwerin, Alemania:

Reporte experto en desinfección de instrumentos de acuerdo a las directrices de VAH/DGHM, 1998-04-16

Dr. Steinmann, virólogo. Bremen, Alemania.

Reporte experto en actividad viruscida de Adenovirus, 1999-02-03; en actividad viruscida de Papova/Polioma, 1999-02-03; en actividad viruscida de Hepatitis B 1998-09-03; en actividad viruscida de Polio a 50°C, 2000-08-22 ; en actividad viruscida de Hepatitis C (DVBV), 2001-11-14 y en actividad viruscida de vaccinia, 2006-07-24;

Prof. Dr. Trautmann, higienologo. Ulm, Alemania: Reporte experto en desinfección de instrumentos utilizando ultrasonido 2000-06-06.

Dr. Färber, higienologo Giessen, Alemania:

Reporte experto en el tiempo de reposo de la solución, 1997-06-18.

Reporte experto en actividad esporicida, 1997-07-29.

Dermatest, Dr. Voss, dermatologist, Münster, Alemania: Reporte experto en tolerancia de la piel a la solución 1997-04-29

Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Alemania: Prueba de material con endoscopios, 2002-03-08.

Vitalisklinik (Hospital), Bad Hersfeld, Alemania. Recomendación para el uso en unidad automática de dosis "Unicleaner D 40" de la compañía Pauldrach GmbH, 2002-03-12

BAM (Instituto Aleman de prueba de materiales), Berlín, Alemania.

Reporte de disolución de concentrados de desinfectantes con la ayuda del instrumento de medición. DG 3 (Henkel), 2000-05-25.

S. Bosse, Melsungen, Alemania: Prueba en referencia a las habilidades de limpieza de Perfektan Endo, Septiembre 1998.

Philips Medical Systems GmbH, Liberación de Perfektan Endo para ser utilizado en unidades Philips de ultrasonido, Marzo 2005.

Richard Wolf GmbH: Pruebas de materiales con endoscopios, 2002-11-28.

CERTIFICACIÓN Y REGISTRO

Registrado en lista actual de desinfectantes de la DGHM/VAH. Cumple con las directrices de la EU 93/42EEC para dispositivos médicos.

(VAH = Asociación de Higiene Aplicada)

(DGHM = Sociedad Alemana para Higiene y Microbiología)

