

## Toallitas desinfectantes

# DESCOCEPT AF WIPES

## Toallitas para desinfección rápida

- libre de aldehídos
- aroma fresco
- efectividad extensa incl. Noro virus

### Propiedades del Producto

**DESCOCEPT AF WIPES** son toallitas desinfectantes listas para usarse, libres de aldehídos; basadas en etanol y componentes de cuaternarios de amonio. **DESCOCEPT AF WIPES** tiene un aroma fresco y agradable. La decoloración de los materiales después de usar **DESCOCEPT AF WIPES** es virtualmente imposible, debido a su composición libre de aldehídos. La solución desinfectante es extensivamente efectiva contra los virus inclusive Noro virus. **DESCOCEPT AF WIPES** es el desinfectante de superficies ideal para las áreas que requieren de una desinfección rápida, en superficies e inventario resistente al alcohol.

**DESCOCEPT AF WIPES** con su empaque de dispensador, permite que se extraigan las toallitas de manera individual y estén listas para usarse inmediatamente.

### Rango de Aplicación

De acuerdo a la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD): Desinfección rápida de dispositivos médicos no invasivos resistentes al alcohol.

De acuerdo a la Regulación de Productos Biocidas: Desinfección rápida y limpieza de inventario médico y todo tipo de superficies resistentes al alcohol.

### Aplicación

Limpiar superficies y objetos con **DESCOCEPT AF WIPES**. Las superficies deben de permanecer completamente mojadas por el tiempo de contacto requerido.

### Tiempos de Aplicación

En referencia a la solución líquida Descosept AF:

### Propiedades Antimicrobianas

La solución desinfectante **DESCOCEPT AF** es:

- bactericida (incl. MRSA)
- tuberculocida
- levurocida, fungicida
- virus inactivante incl. VHB/HIV/VHC/BVDV/Rota-/Adeno-/Vaccinia-/Noro virus



Propiedades Antimicrobiana		30 seg.	1 min.	2 min.	5 min.	30 min.
Desinfección de superficies De acuerdo DGHM/VAH (bactericida, levurocida)	con acción mecánica condiciones sucias		•			
	sin acción mecánica condiciones limpias		•			
	sin acción mecánica condiciones sucias			•		
Desinfección de superficies De acuerdo DGHM/VAH (tuberculocida)	sin acción mecánica condiciones limpias			•		
	activo contra todos virus envueltos incl VHB/HIV/VHC					
Adeno virus	de acuerdo RKI/DVV	•				
	BVDV	•				
	Vaccinia-Virus	•				
Rota virus	de acuerdo RKI/DVV		•			
Noro virus (MNV)	de acuerdo EN 14476				•	
tuberculocida (M. terrae)	de acuerdo EN14348		•			
fungicida (Aspergillus brasiliensis)	condiciones limpias					•



## DESCOCEPT AF WIPES

Toallitas para desinfección rápida

### Tiempos de Contacto de acuerdo a EN

Propiedades Antimicrobianas		30 seg.	1 min.
EN 1040	bactericida	•	
EN 1275	levurocida	•	
EN 1276	bactericida, condiciones limpias		•
EN 1650 (C. albicans)	levurocida, condiciones limpias		•
EN 13727	bactericida, condiciones limpias	•	
EN 13624 (C. albicans)	levurocida, condiciones limpias		•
EN 13697	bactericida, condiciones limpias		•
EN 13697 (C. albicans)	levurocida, condiciones limpias		•

### Composición

100 g de solución de DESCOCEPT AF contiene los ingredientes activos:

42.0 g etanol, 0.05 g cloruro de didecildimetilamónio

Contiene perfumes.

### Propiedades Químicas/Físicas

Información referente a la solución de DESCOCEPT AF

Apariencia: clara, líquido incoloro  
 pH-valor: 7.0 +/- 1.0  
 Punto de Flama: 25°C  
 DIN 51 755:

### Unidades de Entrega

Unidades	Unidades de entrega	ID	REF-No.
caja /120 wipes	12 x 1 caja	1898486	00-312-D120
refill /120 wipes	12 x 1 bolsa	1898581	00-312-R120

### Información Adicional

Sólido inflamable. Si se necesita consejo médico, tener a la mano el envase del producto o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otros fuentes de ignición. No Fumar. Mantener el contenedor bien cerrado. No respire el vapor. Utilizar solo al aire libre o en un área bien ventilada. EN CASO DE CONTACTO CON OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de quitar. Continúe enjuagando. Deseche contenido y empaque de manera adecuada. Recicle.

### Opinión de Expertos

Reportes de expertos referentes a la solución desinfectante DESCOCEPT AF:

**Dr. Pitten**, Hygienist, Gießen: Expert's report on surface disinfection acc. to DGHM/VAH-guidelines.

Expert's report on tuberculocidal activity acc. to EN14348.

**Dr. Suchomel**, Hygienist, Vienna: Expert's report on surface disinfection acc. to DGHM/VAH-guidelines.

**Dr. Steinmann**, Virologist, Bremen: Expert's report on virucidal activity against Adeno virus, Vaccinia virus (BVDV), Rota virus.

**Prof. Dr. Werner**, Hygienist, Schwerin: Expert's report on the tuberculocidal activity. Expert's report on Noro virucidal (MNV) activity acc. To EN 14476. Expert's report on bactericidal and yeasticidal efficacy acc. to EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 13727, EN 13624, EN 1650 and EN 13697.

**Dr. Brill**, Hygienist, Hamburg: Expert's report on fungicidal activity (Aspergillus niger).

**Dr. Voss**, Dermatest, Münster: Expert's report on skin tolerance (epicutane test).

**Konrad Hornschuch AG**, Weißbach: Manufacturer's approval for use with Skai® cushion materials.

**Bergé & Co. GmbH**, Versmold: Manufacturer's approval for use Descosept AF with MM disinfection mats.

### Estatus del Producto/listados

La solución desinfectante DESCOCEPT AF está listada en la lista de desinfectantes actual de la VAH/DGHM y de la ÖGHMP.

La solución desinfectante DESCOCEPT AF está listada en la lista IHO de desinfectantes viruscidas (www.iho-viruzidie-liste.de).

DESCOCEPT AF WIPES está registrada como un producto biocida en la BAuA (Instituto Alemán para protección del empleo y medicina ocupacional):

BAuA reg. No.: N - 39455.

DESCOCEPT AF WIPES se conforma a las directrices EU-93/42/EC para dispositivos médicos.

### Información Ambiental

Los productos de Dr. Schumacher GmbH se fabrican con procesos modernos, seguros y amigables con el ambiente. Debido a la conformidad con estándares de alta calidad, la constante y muy buena calidad del producto está garantizada.

Use desinfectantes de manera segura. Siempre lea la etiqueta e información del producto antes del uso



Dr. Schumacher GmbH is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 and has a validated eco management system (according to EMAS).

We are members of IHO, VCI, BAH, DGSV and DGKH.