

SPEZIAL ÖLSPRAY

✓ libre de CFCs

Espray para mantenimiento de instrumental médicos

- basado en aceite blanco médico toxicológicamente inofensivo
- para mantenimiento de instrumentos previo a la esterilización con vapor
- lubricación óptima de las piezas móviles de los instrumentos



CE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

SPEZIAL ÖLSPRAY es un espray en aerosol para el mantenimiento de instrumental médico, especialmente para instrumentos articulados. Después del tratamiento con **SPEZIAL ÖLSPRAY**, el instrumental médico se puede someter a la esterilización con vapor. Es ideal para el mantenimiento de bisagras y válvulas de endoscopios rígidos. La válvula del espray especial, ofrece una capa fina y uniforme de protección. La capa de protección aplicada sobre los instrumentos, no afecta a la esterilización posterior. **SPEZIAL ÖLSPRAY** ayuda a mantener el instrumental en condiciones óptimas, gracias a su lubricación efectiva y a los componentes que inhiben la corrosión. Los componentes **SPEZIAL ÖLSPRAY** son compatibles con la mayor parte de los materiales y toxicológicamente inofensivos de acuerdo a las leyes para alimentos y medicamentos.

RANGO DE APLICACIÓN

Para mantenimiento de:

- instrumentos médicos (e.g. previo a esterilización)
- turbinas
- bisagras, piezas de mano y piezas angulares
- válvulas de endoscopios rígidos

SPEZIAL ÖLSPRAY garantiza una lubricación óptima de las partes móviles de instrumentos médicos, debido a que forma una capa de protección uniforme en la superficie de dispositivos de acero, garantizando asimismo protección contra corrosión.

APLICACIÓN

Instrumentos:

Rocíe los instrumentos medio-abiertos con **SPEZIAL ÖLSPRAY** a una distancia aprox. de 25 cm. Si se requiere, esterilizar los instrumentos posteriormente.

Atención: aplicar demasiado aceite pudiera afectar el proceso de esterilización. Únicamente debe de permanecer una película delgada de aceite.

Bisagras, turbinas, piezas de mano y piezas angulares:

Use **SPEZIAL ÖLSPRAY** dos veces al día o rocíe a través de los dispositivos, por aprox. 1 seg antes de la esterilización o utilización de autoclave respectivamente. Para aplicar el producto sostenga la botella verticalmente y oprima botón. Agítese antes de utilizar.

COMPOSICIÓN

Parafina líquida DAB 10

Propelante: propano/butano (libre de CFCs)

UNIDADES DE ENTREGA

unidad individual	unidad entrega	REF-No.
Lata aerosol 500 ml	12 x 500 ml	00-108-005

INFORMACIÓN ESPECIAL

El contenedor está bajo presión. Evite exponer a rayos solares y temperaturas que excedan 50°C. No perforo ni incinere el contenedor, aun cuando se encuentre vacío. Es altamente inflamable.

No rocíe a flamas abiertas o superficies calientes. Manténgase alejado de fuentes de encendido – no fume.

En caso de ventilación insuficiente es posible la acumulación de gas.

Si utiliza **SPEZIAL ÖLSPRAY** en materiales de latex o hule, estos se pueden hinchar.

ESTATUS DEL PRODUCTO

Cumple con las directrices de la EU 93/42 EEC para dispositivos médicos.

Material para uso exclusivo de representantes



DR. SCHUMACHER GMBH
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld
Telephone +49 5664 9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM